

LAX VOX®

LAX VOX® slang

De Lax Vox® slang is levensmiddelen geschikt volgens FDA CFR Par. 177.2600 / BGVV (food keur), is non toxisch, vochtbestendig en waterafstotend. Drinkwater geschikt volgens KTW, DVGW 270. De slang is steriliseerbaar en stoombestendig tot + 135°C. Herhaaldelijke sterilisatie met stoom en bestraling moeten voorkomen worden aangezien dit de eigenschappen van het materiaal kan beïnvloeden.

Reinig de Lax Vox® slang voor gebruik

Bij productie van de slang wordt talkpoeder gebruikt om plakken van de slang tegen te gaan. Wij adviseren de slang voor gebruik te reinigen met heet water en eventueel (groene) zeep om de talkpoeder te verwijderen. Vervolgens **goed naspoelen** met schoon water.

Opslag voorschriften en gebruik

- De slang gescheiden van andere PVC producten en nimmer in PVC verpakken of opslaan vanwege weekmakers in PVC. Deze tasten de slang aan. U kunt wel PE (polyethyleen verpakking) of karton gebruiken.
- Opslagtemperatuur onder 25°C (niet onder -30°C)
- Relatieve vochtigheid niet meer dan +70%
- Opslag in de buitenlucht is niet toegestaan.
- Bij langdurige opslag kan verspreid witte uitslag op het oppervlak optreden
- Slangen niet geknikt of platgedrukt opslaan. Meestal verdwijnen knikken weer bij het uitrollen of strekken.
- Onderliggende producten mogen door het gewicht van daarop liggende producten niet vervormen.

Afstand elastiekjes

De bijgeleverde elastiekjes zijn loodvrij, latexvrij, BPA-vrij, Phthalate-vrij, TUV en CE gekeurd. De elastiekjes dienen 2x om de Lax Vox® slang te worden gewikkeld en worden gebruikt als afstand indicator. Veelal worden de afstanden 1 cm, 2 tot 3 cm en 3 tot 4 cm van de onderzijde aangehouden. Op internet vindt u veel stemoefeningen met behulp van Lax Vox methode. Raadpleeg bij twijfel een zangcoach of logopedist.

